

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Ostrzeżenia ogólne

- Przed użyciem worka na zwłoki użytkownik powinien uważnie przeczytać załączoną instrukcję, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie środki bezpieczeństwa i procedury, które należy przestrzegać, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia worka na zwłoki, należy go natychmiast wycofać z użytku.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować worka na zwłoki.
- Należy upewnić się, że podjęto wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć zagrożeń wynikających z kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi.
- Użytkownik musi zawsze nosić rękawice.
- W przypadku ryzyka skażenia obowiązkowe jest noszenie środków ochrony indywidualnej.
- Worek na zwłoki należy używać wyłącznie pod nadzorem osoby doświadczonej.
- Do przenoszenia zwłok wymagane jest co najmniej dwóch użytkowników, z których jeden musi być doświadczony.
- Worek na zwłoki nie może być narażony na działanie ani mieć kontaktu ze źródłami ciepła, ognia ani substancjami łatwopalnymi.
- Upewnić się, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się żadne ostre przedmioty, które mogłyby przebić folię.
- Zamek błyskawiczny musi być zawsze skierowany do góry, aby zapobiec przeciekaniu i osłabieniu wytrzymałości.
- Worek na zwłoki nie może być ponownie używany pod żadnym pozorem.

### Transport i przechowywanie

- Palety z towarem nie nadają się do układania w stosy.
- Zachowaj oryginalne opakowanie do przechowywania i wykorzystania w razie dalszego transportu.
- Worek na zwłoki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.
- Minimalna temperatura przechowywania wynosi od -25 do maksymalnej 50°C.

### Zastosowanie

- W przypadku worków na zwłoki bez uchwytów obowiązkowe jest użycie noszy. Gdy ciało znajduje się w worku, należy przewrócić je na bok i wsunąć nosze pod ciało.
- W żadnym wypadku nie należy podnosić worka na zwłoki z miejsca innego niż przeznaczone do tego uchwyty.
- Otwórz całkowicie zamek błyskawiczny.
- Umieść worek na zwłoki jak najbliżej ciała.
- Przewróć ciało na bok i wsuń worek pod ciało tak daleko, jak to możliwe.
- Przewróć ciało z powrotem na plecy, częściowo wkładając je do worka.
- Teraz przewróć ciało na drugą stronę i całkowicie rozłóż worek.
- Po ponownym ułożeniu ciała na plecach można zamknąć zamek błyskawiczny.